



# Tabtime Super 8 Pillendose

## Alarm einstellen

Für die Tabtime Super 8 kann man einen akustischen Alarm einstellen, sodass man an die Einnahme der Tablette erinnert wird.

1. Drücke den MODE Knopf und es erscheint -- und Nummer 1 mit einer Glocke.
2. Drücke und halte den MODE Knopf erneut, bis das Zeichen -- blinkt.
3. Jetzt kannst du die Zeit für den Alarm einstellen mit den Knöpfen HOUR (Stunde) und MINUTE.
4. Drücke anschließend wieder MODE, um zu speichern. Der Alarm 1 ist nun eingestellt.
5. Wiederhole diesen Vorgang, bist du alle Zeiten für die verschiedenen Erinnerungen eingestellt hast.

Zum Zeitpunkt des Alarms gibt es einen 40 Sekunden langen Piepton und die rote LED fängt an zu blinken. Der Piepton erlischt, wenn man die Box öffnet. Man kann aber auch den MINUTE Knopf drücken.