




## Withings Scanwatch

### EKG-Aufzeichnungen speichern-teilen

Nach der EKG-Messung können Sie Ihre EKG-Ergebnisse an Ihren Arzt senden oder abspeichern und/oder ausdrucken. Befolgen Sie hierfür bitte die nachstehenden Schritte:

1. Öffnen Sie die Health Mate App.
2. Wählen Sie eine EKG-Aufnahme auf dem Startbildschirm aus.

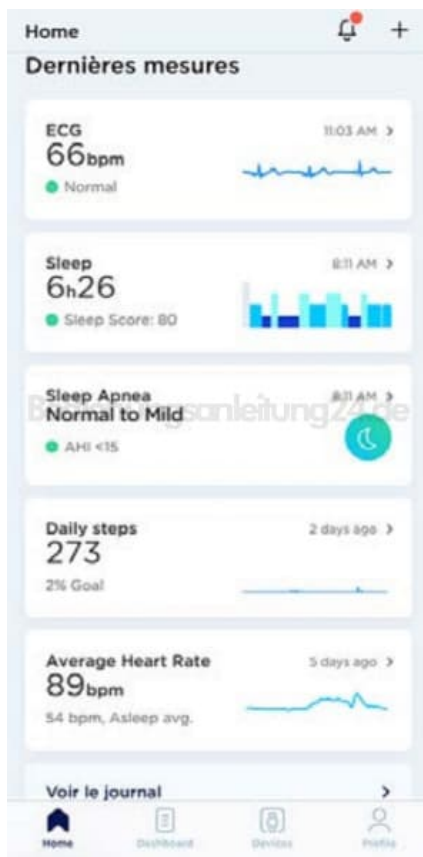

3. Tippen Sie auf **PDF mit Ihrem Arzt teilen**.



4. Tippen Sie auf das Symbol am oberen rechten Rand des Bildschirms.



5. Wählen Sie aus, wie Sie Ihre Einladung versenden möchten.  
Es sind mehrere Optionen verfügbar, wie Nachricht und E-Mail.

Sie können Ihre EKG-Ergebnisse auch ausdrucken oder speichern.