



swisstone SW 660 ECG

Uhr verbinden

Installiere die App auf deinem Smartphone oder Tablet.

Kompatible Geräte

- Android, Version 4.4 und höher
- iOS, Version 8.2 und höher
- Bluetooth 4.0 und neueren Versionen

1. Lade die App **swissFit ECG** von Google Play oder aus dem App Store herunter und installiere sie.



Bedienungshandbuch 24.de



2. Öffne die App und erstelle zunächst einen Account (wähle "Registrieren").

3. VERBINDEN


Aktiviere Bluetooth auf deinem Smartphone oder Tablet.

4. Öffne die App, wechsel unten in der Statusleiste unten auf "**Ich**" und klicke auf **Verbindung mit einem Gerät herstellen**.

Die App sucht nun nach der Uhr.



5. Klicke anschließend auf den Namen der Uhr **SW 660 ECG**.

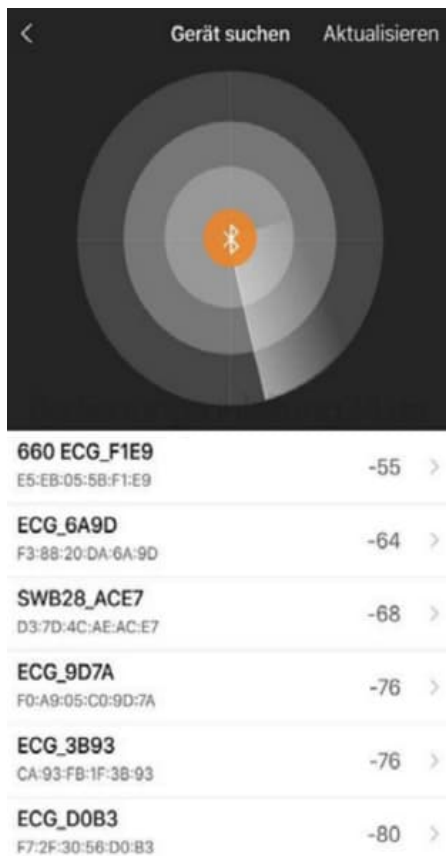

6. Folge den weiteren Anweisungen in der App.

7. Nachdem du die Verbindung zur Uhr hergestellt hast, gebe deine Benutzerdaten ein. Klicke dazu in der unteren Statusleiste der App auf **"Ich"** und gib im Dialogfenster Größe, Gewicht, Geschlecht sowie die zutreffende Trageweise (links oder rechts) ein.

Tip: durch Angabe der richtigen Daten können die Daten genauer und effektiver gemessen werden.



The screenshot shows the 'Benutzereinstellungen' (User Settings) screen. At the top, there is a back arrow and the title 'Benutzereinstellungen'. Below the title is a profile picture and the ID 'ID: 1067063694'. The settings are organized into sections: 'Benutzereinstellungen' (User Settings) with fields for 'Benutzername' (Kitty), 'Höhe' (163cm), 'Gewicht' (48kg), 'Geburtstag' (1991-05-29), 'Geschlecht' (Weiblich), and 'Tragestile' (Rechte/Linke). Below this is 'Hautfarbe Auswahl' with a color selection box. At the bottom, there is a 'Sicherheits-einstellung' section with the option 'Ändern Sie das Passwort'.

8. Nach dem ersten Pairing synchronisiert die Uhr die Daten automatisch.

Schritte, aktive Kalorien, Wegstrecke, Sprache, Datum und Uhrzeit werden synchronisiert.

