



## swisstone SW 660 ECG

### Uhr verbinden

Installiere die App auf deinem Smartphone oder Tablet.

#### Kompatible Geräte

- Android, Version 4.4 und höher
- iOS, Version 8.2 und höher
- Bluetooth 4.0 und neueren Versionen

1. Lade die App **swissFit ECG** von Google Play oder aus dem App Store herunter und installiere sie.



Bedienungshandbuch 24.de



2. Öffne die App und erstelle zunächst einen Account (wähle "Registrieren").

### 3. VERBINDEN


Aktiviere Bluetooth auf deinem Smartphone oder Tablet.

4. Öffne die App, wechsel unten in der Statusleiste unten auf "**Ich**" und klicke auf **Verbindung mit einem Gerät herstellen**.

Die App sucht nun nach der Uhr.



5. Klicke anschließend auf den Namen der Uhr **SW 660 ECG**.

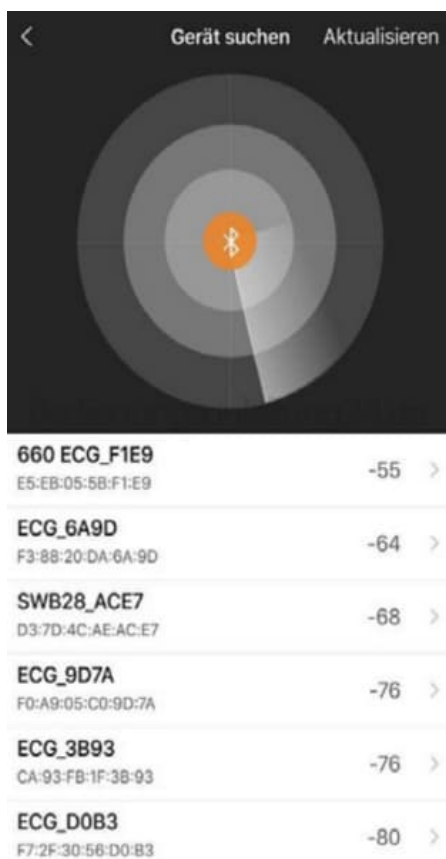

6. Folge den weiteren Anweisungen in der App.

7. Nachdem du die Verbindung zur Uhr hergestellt hast, gebe deine Benutzerdaten ein. Klicke dazu in der unteren Statusleiste der App auf **"Ich"** und gib im Dialogfenster Größe, Gewicht, Geschlecht sowie die zutreffende Trageweise (links oder rechts) ein.

**Tip: durch Angabe der richtigen Daten können die Daten genauer und effektiver gemessen werden.**

The screenshot shows the 'Benutzereinstellungen' (User Settings) screen. At the top, there is a back arrow and the title 'Benutzereinstellungen'. Below the title is a profile picture and the ID 'ID: 1067063694'. The settings are organized into sections:

- Benutzereinstellungen**
  - Benutzername: Kitty
  - Höhe: 163cm
  - Gewicht: 48kg
  - Geburtstag: 1991-05-29
  - Geschlecht: Weiblich
  - Tragestile: Rechte (selected), Linke
  - Hautfarbe Auswahl:
- Sicherheitseinstellung**
  - Ändern Sie das Passwort

8. Nach dem ersten Pairing synchronisiert die Uhr die Daten automatisch.

Schritte, aktive Kalorien, Wegstrecke, Sprache, Datum und Uhrzeit werden synchronisiert.

