



## Sanitas SBM 36

### Fehlerbehebung

Bei Fehlern erscheint auf dem Display die Fehlermeldung **E\_**.

Folgende Fehlermeldungen können auftreten:

1. **E1**  
Der Puls konnte nicht erfasst werden.
  
2. **E2**  
Während der Messung wurde gesprochen oder es wurde sich bewegt.
  
3. **E3**  
Die Manschette wurde zu stark bzw. zu schwach angelegt.
  
4. **E4**  
Fehler während der Messung.
  
5. **E5**  
Der Aufpumpdruck ist höher als 300mmHg.
  
6. **E6**  
Die Batterien sind fast verbraucht.

---

Wiederhole in diesen Fällen die Messung. Achte darauf, dass der Manschettenschlauch ordnungsgemäß eingesteckt ist und du dich nicht bewegst oder sprichst.

Setze gegebenenfalls die Batterien neu ein oder ersetze diese.