



Beurer BM 54

Verbindung herstellen und Messwerte übertragen

Beim erstmaligen Verbinden mit der App wird auf dem Gerät ein zufällig generierter, sechsstelliger PIN-Code angezeigt. Gleichzeitig erscheint in der App ein Eingabefeld.

🔍 Gib diesen PIN-Code ein, um die Verbindung herzustellen.

Nach erfolgreicher Eingabe des PIN-Codes ist dein Blutdruckmessgerät mit deinem Smartphone verbunden. Messwerte werden dann per Bluetooth an dein Smartphone übertragen.

1. Bluetooth aktivieren

Stelle sicher, dass Bluetooth auf dem Blutdruckmessgerät aktiviert ist.

- 2. Drücke die START/STOPP-Taste, um das Gerät einzuschalten. Halte diese Taste für etwa 5 Sekunden gedrückt, bis das Einstellungs Menü erscheint.**

Falls es die erste Verbindung ist:

- Im Display blinkt das Stundenformat (12h oder 24h). Wähle mit den Tasten M1 oder M2 das gewünschte Format und bestätige mit der START/STOPP-Taste.

- Folge dem gleichen Verfahren, um Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute einzustellen.



3. Wähle mit den Tasten M1 oder M2, ob die automatische Bluetooth-Datenübertragung aktiviert (ON) oder deaktiviert (OFF) sein soll und bestätige die Auswahl mit der START/STOPP-Taste.



4. Nach Abschluss der Einstellungen schaltet sich das Gerät automatisch aus oder du kannst es manuell mit der

START/STOPP-Taste ausschalten.

Wenn Bluetooth aktiviert ist, erscheint das Bluetooth-Symbol dauerhaft im Display.

5. HealthManager-App einrichten

Lade die beurer HealthManager-App aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter und installiere sie.

[? App für Android](#)

[? App für iOS](#)



6. Öffne die App und füge das Blutdruckmessgerät hinzu

[?](#) Navigiere in der App zu Einstellungen / Meine Geräte und wähle dort das BM 54 aus.

7. Messung durchführen

Führe nun eine Blutdruckmessung durch.

8. Datenübertragung

[?](#) *Direkt nach der Messung:*

Stelle sicher, dass die Bluetooth-Datenübertragung aktiviert ist. Nach der Messung bestätigst du den Benutzerspeicher mit der START/STOPP-Taste. Die Daten werden dann automatisch übertragen.

[?](#) *Zu einem späteren Zeitpunkt:*

Gehe in den Speicherabruf-Modus (drücke entweder die M1-Taste oder die M2-Taste, je nachdem, welcher Speicher abgerufen werden soll). Wähle den gewünschten Benutzerspeicher aus. Die Übertragung der Daten per Bluetooth startet automatisch.